


Entfernen Sie den Inzisaltisch aus Kunststoff vom Artikulator




Platzieren Sie den einstellbaren Inzisaltisch und befestigen Sie ihn mit der kleinen Fingerschraube.




Stellen Sie die Inzisalführung wie gewünscht ein und befestigen Sie sie mit der großen Fingerschraube.

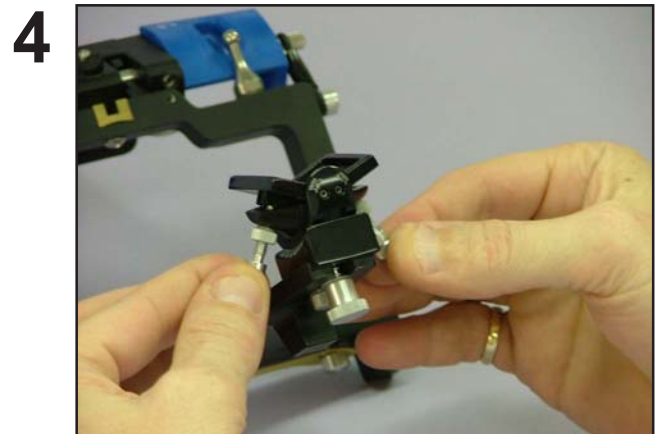

Stellen Sie die gewünschte seitliche Führung mit den seitlichen Einstellschrauben ein.

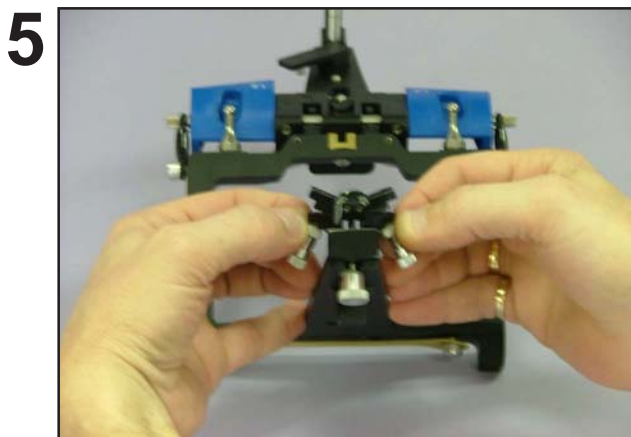

Befestigen Sie die seitliche Führung, indem Sie die seitlichen Kontermuttern festziehen.

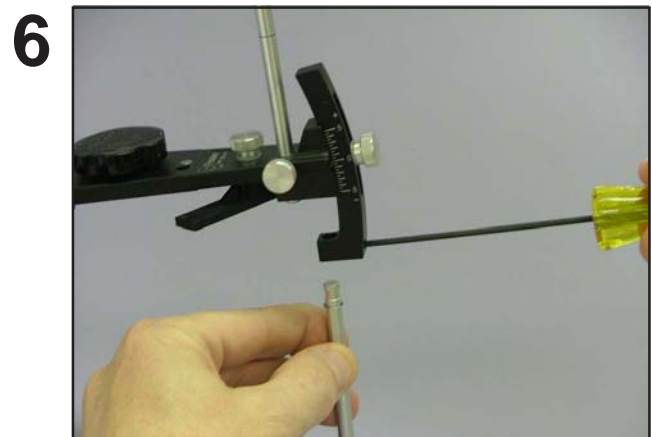

Platzieren Sie bei dem (dargestellten) PCH-Artikulator den neuen Löffelpunkt-Inzisaltisch mit dem Sechskantschlüssel. Drehen Sie beim SH- oder PSH-Artikulator den Inzisaltisch um, sodass der Löffelpunkt nach unten weist.