



Magnetische Biss-Gabelstütze Anweisungen

1

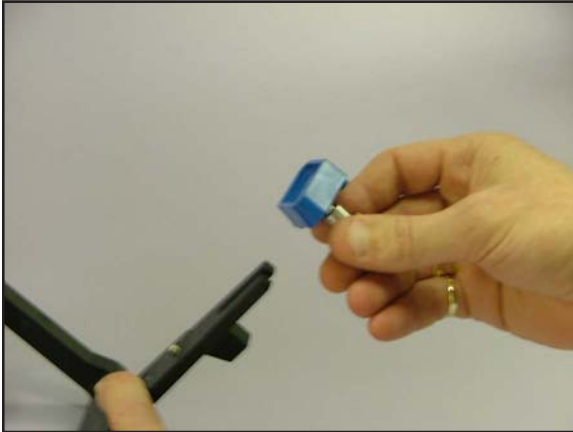


Entfernen Sie den Inzisaltisch aus Kunststoff vom Artikulator

2

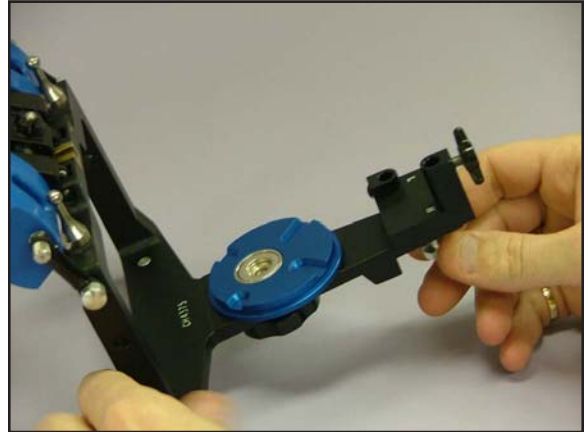


Die Montagevorrichtung in der Inzisaltischaufnahme platzieren und mit der Fingerschraube arretieren.

3

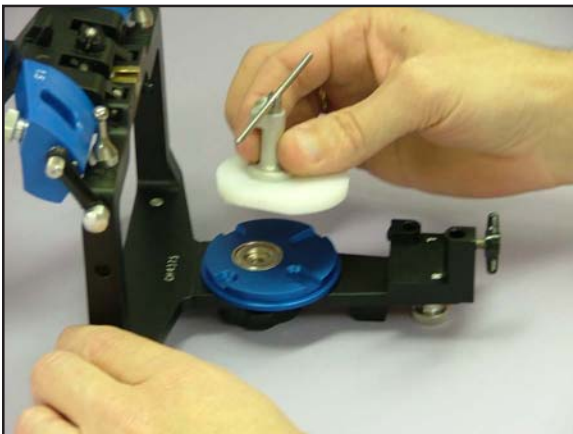


Magnetische Bissgabelstütze zur magnetischen Montageplatte auf dem unteren Rahmen des Artikulators indexieren.

4

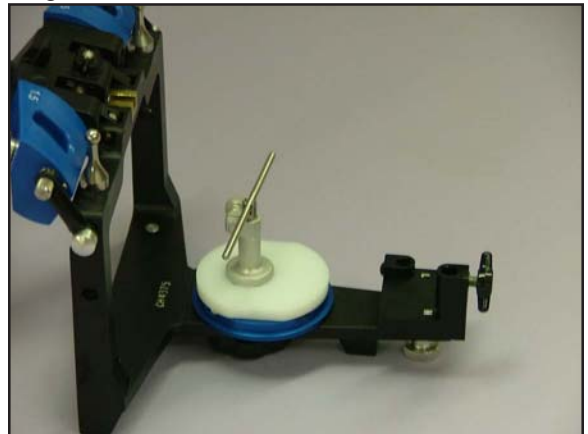

Sicherstellen, dass die Abdruck-Tragstange bis ganz nach unten ausgerichtet ist.

5

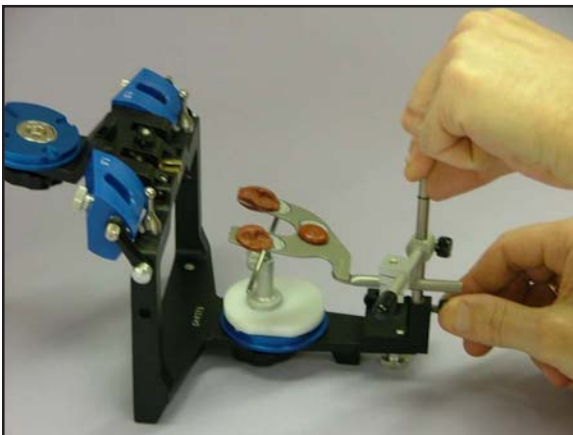

Die Bissgabel in der Montagevorrichtung platzieren und arretieren.

6



Sanft die Abdruck-Tragstange nach oben ziehen, bis sie die Biss-Gabel berührt und mit der Fingerschraube arretieren. Studienabdruck in der normalen Weise montieren.