

Einstellen der Montageplattenschraube

1. Montageplatten-Schraubknopf durch Abschrauben vom Rahmen des Artikulators vom Artikulator entfernen.



2. Die Feststellschraube im Schraubknopf mit dem Sechskantschlüssel lösen.



3. Schraubenwelle mit dem Finer in den Schraubknopf drücken.



4. Feststellschraube im Schraubknopf mit dem Sechskantschlüssel anziehen, um die Schraubenwelle festzusetzen. Den Schraubknopf wieder im Artikulator platzieren.

