

M Panadent Corporation
 580 S. Rancho Avenue • Colton, Kalifornien 92324, USA
 (909) 783-1841

Diese Anweisungen gelten
 für das folgende Element:

REF 4410



1. Platzieren Sie Bite-Tabs auf der Oberseite der Bissgabel. Tempern Sie die Mischung in warmem Wasser (125 °F oder 40 °C).

2. Setzen Sie die Bissgabel in den Mund des Patienten ein und erfassen Sie den Index der maxillaren Zähne in der Bite-Tab-Mischung. Entfernen, kühlen und.

3. Überprüfen Sie die Speesche Kurve der unteren Zähne, um zu bestimmen, ob der Bissgabel-Stabilisator modifiziert werden muss. Meistens können die zweiten Molaren die Bissgabel kontaktieren, was verursacht, dass sie sich dreht.



4. Trocknen Sie die Unterseite der Bissgabel mit einem Handtuch oder Druckluft.

5. Modifizieren Sie den Bissgabel-Stabilisator wie erforderlich, indem Sie den hinteren Teil abschneiden.

6. Entfernen Sie die Papierabdeckung vom Bissgabel-Stabilisator.



7. Befestigen Sie den Biss-Gabel-Stabilisator an der trockenen Unterseite der Bissgabel.

8. Die früher abgeschnittenen Stücke können ausgesondert oder zu dem Bereich hinzugefügt werden wo es erforderlich ist.

9. Mit der im Mund des Patienten wieder eingesetzten Bissgabel, lassen Sie den Patienten den Mund in den Schaumstoff schließen bis es stabil ist. Führen Sie das Gesichtsbogen-Verfahren durch. Entfernen Sie den Bissgabel- Stabilisator vor dem Montageverfahren.

US-Patent angemeldet



⊗ Wenn es mehr als ein Mal verwendet wird, kann eine Patientenquerkontaminierung auftreten.